

# REQUISITOS ELÉCTRICOS Y DE ESPACIO.

## Requisitos mínimos recomendados de espacio de trabajo

El sistema OnSight está diseñado para permitir una instalación fácil y económica en prácticamente cualquier centro. Cuenta con un tamaño reducido y, en la mayoría de los casos, se puede instalar sin necesidad de una costosa sala Plomada<sup>1</sup>. Los requisitos mínimos de espacio en suelo del sistema se muestran a continuación. Consúltelos cuando seleccione y planee un espacio para la instalación.


## Requisitos de alimentación

El sistema OnSight reducirá el tiempo y los costes de la instalación utilizando una conexión eléctrica estándar en lugar de un costoso servicio de alto voltaje.

Es totalmente compatible con una fuente de alimentación específica de 120 V/15 A o 230 V/10 A.

## Requisitos mínimos recomendados de espacio de trabajo para OnSight La normativa local puede disponer la necesidad de espacio adicional

- Sistema OnSight
- Área de trabajo del radiógrafo

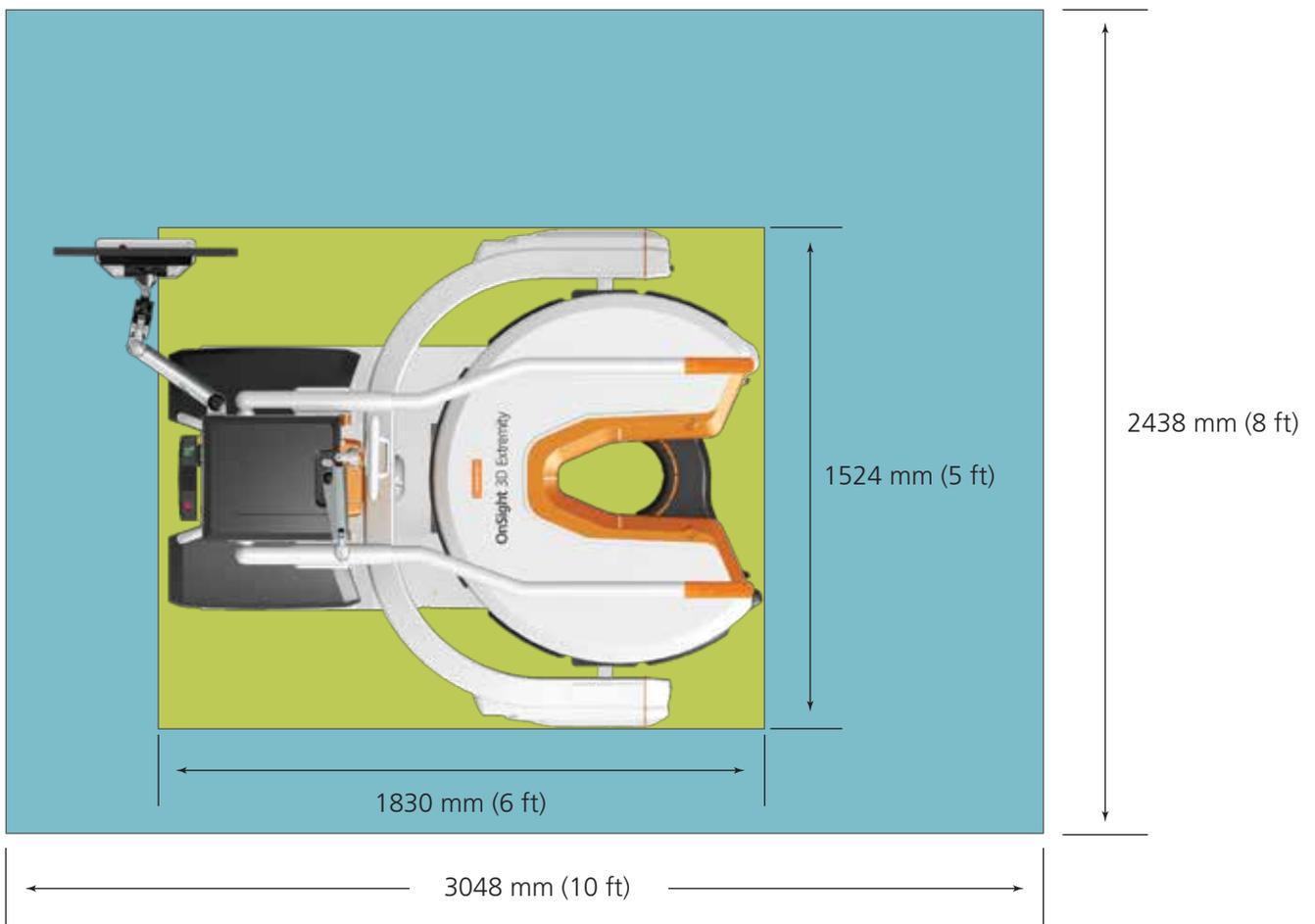

<sup>1</sup> Consulte los requisitos locales.