

## パッケージ内容

- ・シールドホルダー：1個
- ・シールド：2枚
- ・キャップスナップ：2個
- ・額当てクッション：1個

## クリーニング方法

CARESTREAMシールドの各パーツを分解し、消毒用石鹼と温水で洗浄し、流水でよくすすいでから乾かして下さい。シールドの表面は傷つきやすいので柔らかいマイクロファイバーの布で軽く拭きます。クリーニング後でも他者と共用することは避けるようにして下さい。医療施設で衛生管理マニュアルがあれば、それに従った方法で適切に衛生管理を行なってご使用ください。




## 組み立て方

<https://youtu.be/p9I2iUk9T6o>

シールドホルダー



シールド

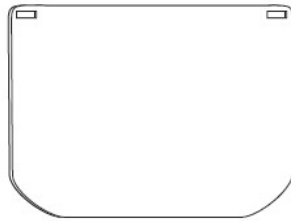

キャップスナップ



額当てクッション



フック




最初にホルダー先端部のフックにシールドをひっかける

クリップ



順番にホルダーのクリップ（3ヶ所）にシールドを挟み込んで、最後にもう片方のフックにひっかける

クリップ3ヶ所 ○

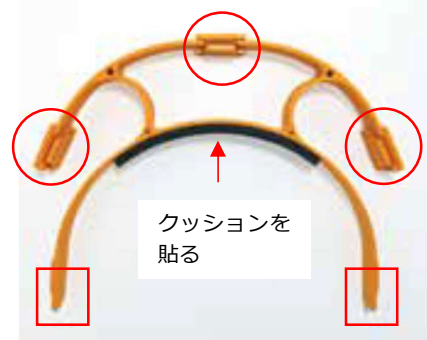

クッションを貼る

フック2ヶ所 □



キャップスナップとホルダーを繋げる



もう片方のキャップスナップも繋げる



完成



CARESTREAMシールドは、患者から放出される湿性生体物質やエアロゾルから医療従事者の目、鼻、口を防護することを目的としており、マスク、ゴーグル、その他のPPE（個人用防護具）と併用することにより感染症対策として高い効果が得られます。なお、この製品単独の使用では感染を十分に防ぐことはできません。また、本製品は医療従事者用に販売しておりますが、感染症対策を必要としている他の職場環境でも使用可能です。本製品には皮膚に接触する部分に次の材料が含まれています。トライタン MXF 121、トライタン MX 711、ダウ LDPE 722、INEOS ポリプロピレン、ポロン 4701、アドケム 256M-74、およびポリエチレンテレフタレート（PET）。危険性評価では可燃性について重大な危険を引き起こすことはないとして評価されています。本製品は米国FDAから医療機器として承認を得た製品ではありませんが、市販前緊急時使用許可法（EUA）にもとづいて医療従事者の個人用防護具としての使用が当局によって許可されています。本製品は許可が終了または早期に取り消されない限り、法の第564条(b)(1)項、21 USC 360bbb-3(b)(1)項に基づいて市販前緊急時使用許可を正当化する状況が宣言されている期間中は許可されています。CARESTREAMシールドは複数回使用できる製品であり、当書面の記載どおりの方法で適切なクリーニングをおこなってください。視認性や製品の有効性が損なわれた場合は必要に応じて廃棄または交換してください。免責事項：本製品は製造上あるいはパッケージに欠陥がある場合は交換いたします。このような交換を除き、過失その他の原因による損傷や損失が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。